

Imported by:  
 NordicDx AS  
 Richard Johnsens gate 4  
 4021 Stavanger Norway



# Urintest for urinveisinfeksjoner




## hurtigveiledning

Vask hendene med såpe og skyll med rent, lunkent vann. Pass på at du har alle komponentene for å utføre testen: teststrimmel, plastkopp og fargekort.

**Viktig:** Det anbefales å ta en urinprøve tidlig om morgenen, da den er mest konsentrert. Urinen som brukes til testen bør ikke komme i kontakt med vann fra toalettet eller noen form for desinfeksjons- eller rengjøringsmidler.


**Kun for kvinner:** Testen bør ikke utføres under eller innen tre dager etter menstruasjonen. Urinprøven må ikke være forurenset med vaginale væsker, da dette kan gi misvisende resultater.

1. Samle en del av urinen i plastkoppen.
2. Åpne posen og ta ut teststrimmelen. Ikke ta på testfeltene.
3. Dypp teststrimmelen i urinprøven. Sørg for at alle fire testfeltene er nedsenket i ca. 1-2 sekunder.
4. Ta deretter ut teststrimmelen og tørk av overflødig urin mot kanten av plastkoppen eller med et absorberende materiale (f.eks. tørkepapir).
5. Vent i 2 minutter (ikke les resultatene etter 3 minutter). Les av resultatene separate for hver parameter ved å sammenligne fargen med fargekortet som følger med testen.

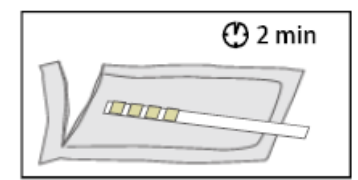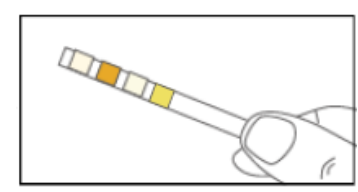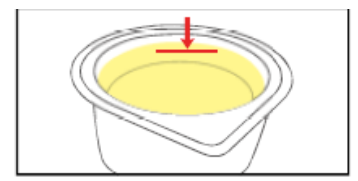


### Tolkning av resultat


a. Negativt resultat

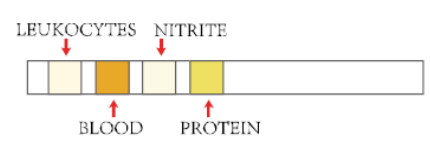


b. Positivt resultat for leukocytter

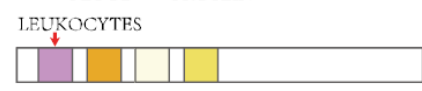

c. Positivt resultat for blod

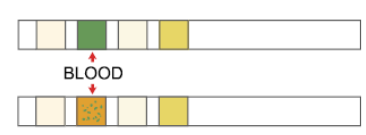

d. Positivt resultat for nitritt

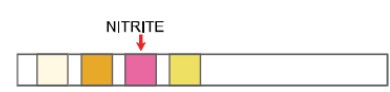

e. Positivt resultat for protein



Les resultatene etter 2 minutter