

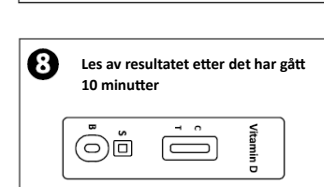
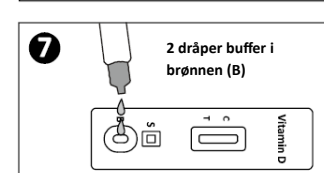
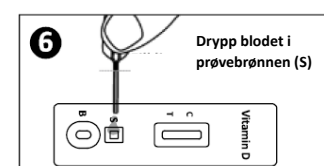
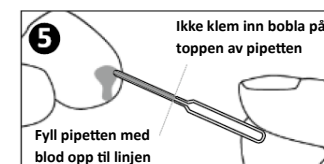


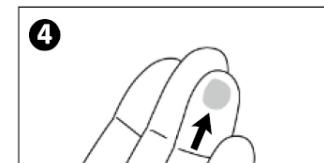

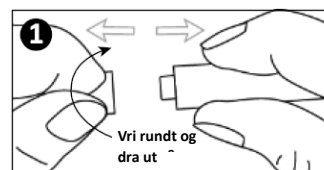


Vitamin D test hurtigveiledning

Vask hendene med såpe og skyll med rent, lunkent vann før du åpner posen og tar ut testkassetten. Pass på at du har alle komponentene for å utføre testen: lansett, buffer tube, pipette, desinfeksjon serviett, test kassett og Vitamin D fargekort.

1. Vri rundt og dra ut den løse delen på lansetten.
2. Desinfiserer fingertuppen på langfingeren eller ringfingeren og la lufttørke.
3. Sett så lansetten litt på skrått på fingeren og trykk inn stempellet slik nålen kommer ut og inn i fingeren (nålen går ikke dypt og er veldig tynn).
4. Klem forsiktig fra roten av fingeren mot tuppen for å frembringe en dråpe blod.
5. Hold pipetten horisontalt mot bloddråpen slik at den fylles med blod. Du skal ikke klemme inn bobla på toppen av pipetten. Blodet vil migrere opp til den angitte linjen på pipetten.
6. Drypp blodet direkte ned i prøvebrønnen merkert (S) ved å klemme inn bobla på toppen av pipetten. Vent til blodet er helt absorbert i brønnen.
7. Drypp deretter 2 dråper buffer i brønnen merkert (B) og vent i 10 minutter før du leser av resultatet.
8. Sammenlign intensiteten på T-linjen med Vitamin D fargekortet. Ikke tolk resultatet etter 20 minutter.



Tolkning av resultatet

Resultat	Visuell tolkning (Bruk Vitamin D fargekortet for sammenligning)
<p>Mangel (0-10 ng/mL)</p> <p>To fargede linjer vises: T-linjen og C-linjen. Intensiteten av T-linjen er lik «Deficient» linjen på kortet (sterk linje). Dette indikerer at Vitamin D nivået er mangelfullt.</p>	
<p>Utilstrekkelig (10-30 ng/mL)</p> <p>T-linjen og C-linjen vises. Intensiteten av T-linjen er lik «Insufficient» linjen på kortet (svak linje). Dette indikerer at Vitamin D nivået er utilstrekkelig.</p>	
<p>Tilstrekkelig (30-100 ng/mL)</p> <p>T-linjen og C-linjen vises. Intensiteten av T-linjen er lik «Sufficient» linjen (veldig svak linje). Dette indikerer at Vitamin D nivået er tilstrekkelig.</p>	
<p>Overskudd (>100 ng/mL)</p> <p>Bare C-linjen vises (ingen T-linje). Dette indikerer at Vitamin D nivået kan være for høyt. Det anbefales å oppsøke råd fra legen.</p>	
<p>Ugyldig</p> <p>C-linjen vises ikke. Utilstrekkelig prøvemengde eller feil i testprosedyren er de mest sannsynlige årsakene til at C-linjen vises ikke. Gå gjennom prosedyren og gjenta med en ny test. Hvis problemet vedvarer, kontakt NordicDx.</p>	

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger



Les av resultatet etter det har gått 10 minutter. Ikke les av resultater etter 20 minutter har passert, disse er ugyldige