



# FIT hurtigveiledning


Imported by:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger Norway

- (1) Ta en avføringsprøve ved bruk av en ren beholder. Legg gjerne prøven på ett rent ark. Åpne buffer tuben og stikk pinnen ned i avføringen på 6 forskjellige steder.

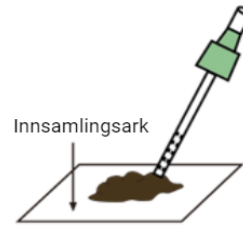

- (2) Sett pinnen ned i bufferen igjen og skru på korken. Rist kraftig slik prøven blander seg med bufferen. Prøven kan oppbevares ved romtemperatur 8 °C til 30 °C (46 - 86 °F) opptil 24 timer eller i kjøleskap 2 °C til 8 °C (36 - 46 °F) i opptil 72 timer..



- (3) Ta testenheten ut av posen og plasser den på en ren, flat overflate.



- (4) Skru av den lille korken på buffer flasken



- (5) Klem ut 3 dråper som dryppes i testbrønnen på kassetten merket (S). Les testresultatene mellom 5-10 minutter. Resultater lest tidligere enn 5 minutter og senere enn 10 minutter er ikke gyldige.



- (6) Tolkning av resultater. Positiv: 2 streker, Negativ: kun strek på C, Ugyldig: Ingen streker eller kun strek i T

