




Legionella hurtigveiledning

- (1) Fjern testen fra posen. For best mulig resultat, bruk testen innen 1 time.
- (2) Prøvetaking: Uriner i en plastkopp eller ett glass.
- (3) Bruk engangspipetten til å overføre ca 2 dråper urin til prøvebrønnen merket (S).
- (4) Les test resultatet etter 15 minutter.
- (5) En kontroll linje i område «C» skal alltid komme tydelig opp for å indikere at testen har fungert. Hvis det også kommer opp en linje i område «T» er testen positiv. Hvis det ikke kommer noen kontroll linje i område «C» er testen ugyldig.

Tolking av resultat

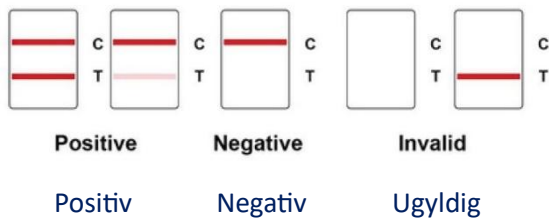

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger