


CRP hurtigtest



Fremgangsmåte

- La test og buffer nå romtemperatur.
- Samle 10 µl blod, serum eller plasma i det lille røret.
- Bland prøven i bufferrøret, rist og la stå i 1 minutt.
- Tilsett 3 dråper av blandingen i testkassetten.
- Les av resultatet etter 5 minutter.

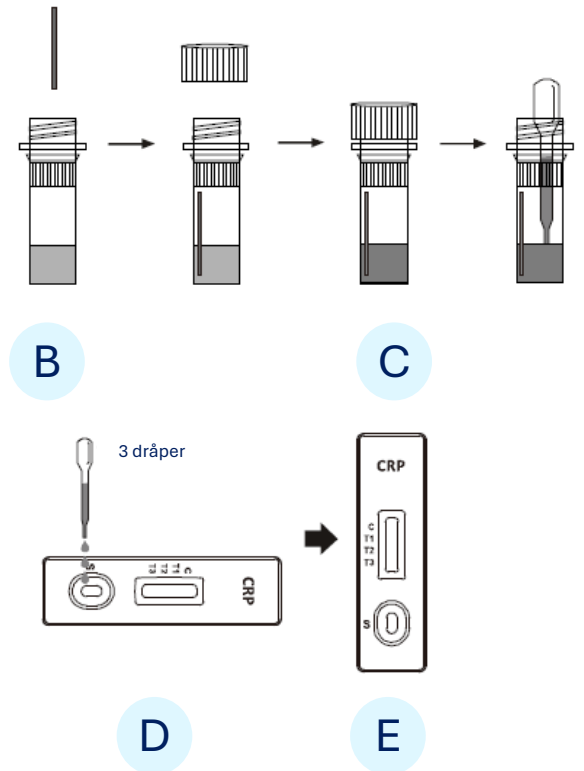

Tolking av test

- C + T3: CRP $\geq 10\mu\text{g/ml}$
- C + T3 + T2: CRP $\geq 40\mu\text{g/ml}$
- C + T3 + T2 + T1: CRP $\geq 80\mu\text{g/ml}$
- Kun C: CRP $< 10\mu\text{g/ml}$ (negativ)
- Ingen C: Ugyldig test – gjenta med ny test.

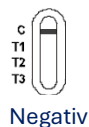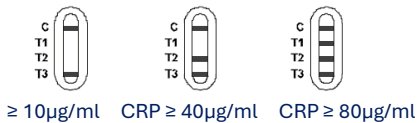

Ugyldig

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger



Les resultater etter 5 minutter. Ikke avles etter 10 minutter.