


SARS-CoV-2, Influenza A/B og RSV hurtigttest

Fremgangsmåte

- Fjern blå propp fra prøverør og sett røret i holder.
- Ta nesesvabb: 2,5 cm inn og roter 5 ganger i hver nesebor.
- Sett svabben i røret, knekk ved markeringen, og lukk lokket.
- Klem svabben 10 ganger i væsken. Vent 1 minutt.
- Skru av spissen og drypp 2 dråper i ønsket brønn (COVID-19, Influenza A/B, RSV).
- Les av etter 15 min.

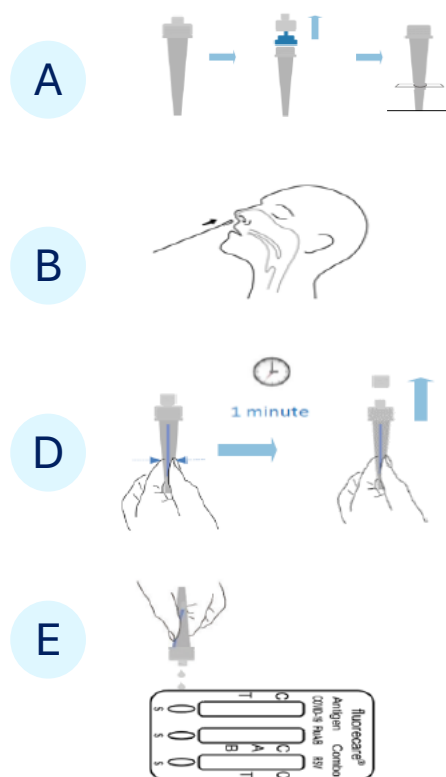

Tolking av test

- Covid-19/RSV positiv: T + C – linje.
- Influenza positiv:
 - A+C = Influenza A
 - B+C = Influenza B
 - A+B+C = Influenza A og B
- Negativ: Kun C-linje
- Ugyldig: Ingen C-linje – test på ny

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger

