


Glutentest – Rask påvisning av cøliaki

Fremgangsmåte

- Vask og tørk fingeren. Stikk med lansett.
- Bruk engangspipette for å samle opp blod (ca 20 µl).
- Drypp 2 dråper av fullblod i prøvebrønnen (S).
- Tilsett 2 dråper buffer.
- Vent i 10 minutter – les resultatet.

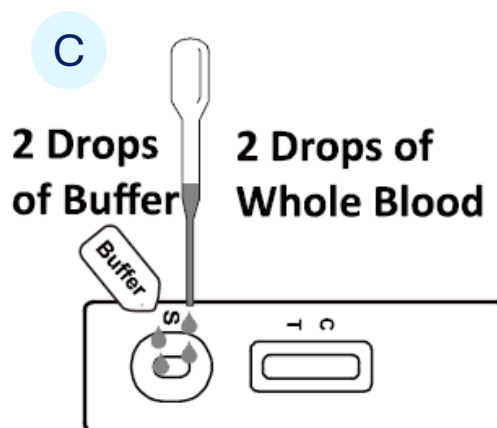

Tolking av test


- Positiv** = to linjer (C og T)
- Negativ** = Én linje (C)
- Ugyldig** = ingen linje i C → test på nytt



Positive



Negative

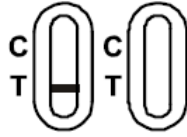

Invalid

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger

