

## Helicobacter pylori hurtigttest

### Fremgangsmåte

#### A. Samle prøve

Samle litt avføring i medfølgende papir/beholder. Unngå kontakt med vann.

#### B. Klargjør prøven

Stikk pinnen i prøven (3 steder), sett lokket godt på og rist røret.

#### C. Utfør testen

Drypp 2 dråper i prøvebrønnen (S).

#### D. Les av

Les resultatet etter 10 minutter.  
Ikke les etter 20 minutter.


A




B



C

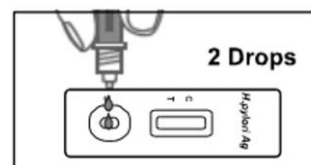

D

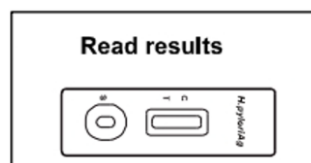

### Tolking av test

**Positiv** = to linjer (C og T),  
H. pylori-antigen påvist.



**Negativ** = én linje (C),  
H.pylori ikke påvist



**Ugyldig** = ingen linje i (C)  
→ test på nytt



#### Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger

