


Multi narkotika hjemmetest


Fremgangsmåte

- Plasser svampen i munnen i 2–3 minutter. Gni langs tannkjøttet og under tungen til svampen er helt mettet.
- Sett svampen i røret, press ut væsken, og skru igjen lokket. Rist i 10 sekunder og la stå i 10 minutter.
- Knekk av tuppen på røret, pakk ut testkassetten og legg den på en ren overflate.
- Drypp 3 dråper i prøvebrønnen (S) på testkassetten. Vent 5 minutter før du leser resultatet.

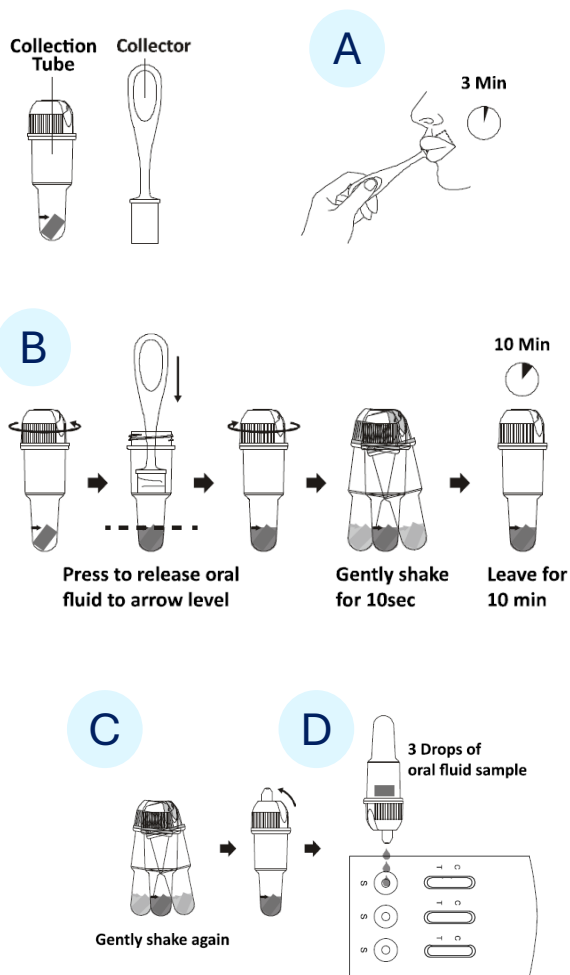

Tolking av test

- Negativ:** To linjer (C og T). Selv en svak T-linje = negativ
- Positiv:** Kun kontrollinje (C)
- Ugyldig:** ingen C-linje. Bruk ny test

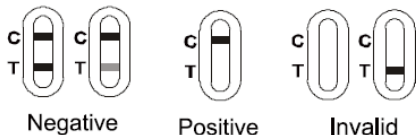

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger



Les resultater etter 5 minutter. Ikke avles etter 15 minutter.