



Graviditetstest, tidlig deteksjon

Fremgangsmåte

- Ta en urinprøve (helst morgenurin) ved bruk av en ren beholder.
- Ta testenheten ut av posen og plasser den på en ren, flat overflate.
- Benytt engangspipetten til å samle urin ved å klemme inn luftboblen på toppen av pipetten, senke pipetten ned i urinen, og deretter la luftboblen slippe ut slik pipetten fylles med urin.
- Bruk engangspipetten til å droppe 3 dråper urin ned i brønnen.

A




Klem her




C

D

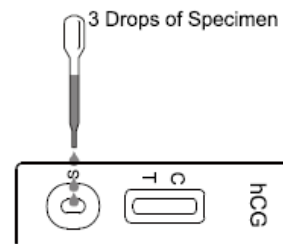


Tolking av test

Sterke positive resultater kan sees etter 2-3 minutter. Svake positive kan ta opptil 5 minutter. Ikke les av resultater etter 7 minutter.

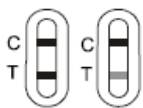

Positiv

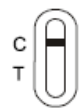

Negativ



Ikke gyldig

Importert av:

NordicDx AS

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger

